



Lentes de contacto blandas de reemplazo programado



• Adaptación

Elección recomendada para la adaptación de Toplens 55:

Cuando K se encuentra entre		TOPLENS 55 Negativas	TOPLENS 55 Positivas
Dioptrías	Milímetros	CB mm	CB mm
39.00 y 42.00	8.65 y 8.04	8.90	
42.00 y 44.50	8.04 y 7.58	8.60	8.80

Visiontech recomienda en todos los casos determinar los radios de curvatura corneales principales.

Siguiendo el esquema de adaptación recomendado, siempre comprobar que las lentes tengan un movimiento de aproximadamente 0,5 a 1 mm durante cada parpadeo.

• Ficha Técnica

Uso: *Diario / Ocasional extendido.*

Diseño: *Esférico*

Reemplazo recomendado: *Bimensual*

Presentación: *Caja x 6 unidades*

Material: *Ocufilem D*

Hidratación: *55%*

Tinte de visibilidad: *Si*

Diámetro (mm): *14,20*

Curva base (mm): *8.60, 8.90 negativas / 8.80 positivas*

Poderes (diop.): *-10.00 a +6.00*

Pasos: *0.25 (+5.00 a -6.00) / 0.50 (+5.00 +6.00 y -6.00 -10.00)*

Espesor central: *0.07 mm*

Zona óptica: *8 mm a 11 mm*

Método de fabricación: *Moldeado en seco (Dry Cast Molded)*

Valor DK: *20 x 10 (-11)*

Condición electromagnética del polímero: *No iónica*

Mantenimiento: *Solución multipropósito*