



TOPLENS TORIC®



CooperVision®
Live Brightly.®

Lente de contacto para astigmatismo que ofrecen la mejor combinación entre comodidad y estabilidad, siempre en la posición correcta.



Ocufileon D
Bloqueador UV

% AGUA	DK	DK/t	FDA	FABRICACIÓN	C.B.	DIÁMETRO	ESPEJOR CENTRAL
55%	19,6	17,8	4	MOLDEADO EN SECO	8.7	14,5	0.11

PODERES	CIL.	EJE	TINTE	USO	REEMPLAZO	CAJA
-6.00 D a + 4.00 D PASOS DE 0.25 D	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° A 180° PASOS DE 10° MARCA A LAS 6	TINTE AZUL CLARO	DIARIO	MENSUAL	6





Toplens Toric® son las lentes de contacto tórica de reemplazo programado especialmente diseñadas para brindar mayor confort y durabilidad al usuario.

Características Técnicas

- Único diseño que garantiza una perfecta estabilidad en el 95% de los casos.
- Exclusivo sistema de producción que asegura mínima rotación al parpadear y estabiliza la agudeza visual.
- Mayor suavidad y seguridad con excelente calidad óptica.
- Uso flexible: mensual o bimensual, según recomendación profesional.
- Fabricadas con Ocufilcon D, un excelente material no iónico que evita la acumulación de depósitos.
- Tinte azulado de visibilidad que facilita la identificación y manipulación.
- Diseño exclusivo que mantiene su estructura estable, brindando una fácil y segura manipulación para el usuario.

Adaptación

Para el componente esférico, tomar el poder de la prescripción médica y efectuar la reducción al vértice, si es necesario. Para el componente cilíndrico utilizar el siguiente cuadro:

VALOR CILÍNDRICO DE LA RECETA	VALOR CILÍNDRICO DE TOPLENS TORIC®
-0.50 D	-0.75 D
-0.75 D	
-1.00 D	
-1.25 D	-1.25 D
-1.50 D	
-1.75 D	-1.75 D
-2.00 D	
-2.25 D	-2.25 D
-2.50 D	

Para el eje del valor cilíndrico

El eje del cilindro estará basado en el valor indicado en la prescripción médica o el determinado en el examen de adaptación, teniendo en cuenta que las lentes **Toplens Toric®** presentan una localización perfecta con más o menos 5° de tolerancia en el 95% de los casos. **Cómo evaluar la adaptación:** Se deben dejar las lentes colocadas durante 20 minutos. Luego una lente bien adaptada mostrará una buena y completa cobertura corneal y un máximo confort. Las lentes deben mantener un movimiento entre 0.5 a 1.0 mm al parpadear. **Cómo controlar la ubicación del cilindro y el cálculo compensatorio:** Las lentes **Toplens Toric®** poseen una marca de orientación vertical en hora 6.00. Una vez estabilizada la lente, se debe observar la posición de la línea de orientación, la forma más efectiva es hacer coincidir el haz del biomicroscopio en forma vertical con la marca de estabilidad en hora 6.