



## DUA ELITE

Solución Multipropósito  
con ácido hialurónico.



Solución multipropósito con  
ácido hialurónico para la  
limpieza de lentes blandas.  
Máxima hidratación.  
No es necesaria la limpieza  
enzimática.



Dua Elite 360ml  
Dua Elite 60ml  
Dua Elite viaje 100ml


### Composición:

Contiene cloruro sódico, citrato sódico, poloxamer 407, hialuronato sódico, EDTA polihexanida 0,0001%.

- Cloruro sódico, para conseguir una solución isotónica.
- Citratos, para la eliminación automática de depósitos de proteínas.
- Poloxamer como surfactante que elimina los depósitos lipídicos.
- Ácido hialurónico (hialuronatosódico) que tiene la capacidad de retener agua y adherir el film lagrimal al epitelio corneal, aumentando el tBUT (tiempo rotura lagrimal).
- EDTA como estabilizante que impide la oxidación.
- PHMB como agente desinfectante.

### Ventajas:

- Contiene ácido hialurónico, lo que aumenta el tBUT.
- No se hace necesario frotar.
- Máxima seguridad.
- Contiene portales antimicrobiano, con efecto bacteriostático.

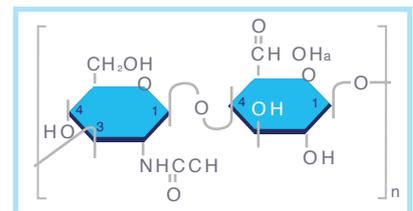



## Beneficios percibidos por el usuario:

- Diseño muy cuidado, que comunica alto valor añadido.
- Aumenta la sensación de comodidad, incluso al final del día.
- Funcionalidad, porque no es necesaria la limpieza enzimática.

## Prescripción recomendada

- Usuarios de lentes de contacto que utilizan las lentes muchas horas al día y que están sometidos a condiciones adversas de sequedad (aire acondicionado).
- Usuarios que podrían incluso llegar a abandonar el uso de lentes de contacto por problemas de sequedad ocular (picor, molestias, ojo rojo al final del día).
- Usuarios que están dispuestos a pagar un poco más a cambio de un producto mejor.

## Consejos prácticos de uso

- ✓ Lavarse bien las manos antes de manipular las lentes de contacto.
- ✓ Quitarse una de las lentes de contacto y aclararla durante unos segundos.
- ✓ Añadir suficiente cantidad de **Dua Elite®** en el estuche portalentes para que al incorporar la lente, ésta quede completamente sumergida en el líquido e introducir la lente de contacto que se acaba de aclarar.
- ✓ En general no es preciso frotar la lente de contacto, pero si se considera necesario se deben añadir dos o tres gotas de **Dua Elite®** sobre la lente y se debe frotar durante unos 20 segundos.
- ✓ Quitar la otra lente de contacto y repetir las mismas operaciones que con la primera.
- ✓ Dejar las lentes de contacto en el portalentes cerrado durante toda la noche o al menos seis horas para su correcta desinfección y limpieza.
- ✓ Antes de ponerse las lentes de nuevo aclararlas durante unos segundos con **Dua Elite®**.